

逆流防止膜

こちらが

A

サイズ

こちらが

B

サイズ

●逆流防止膜をご使用になる方へ●



逆流防止膜のご使用方法

- ・ご使用方法をよくご理解の上、正しくお使い下さい。
- ・下記適応ゲージを参考に、ご自身に合ったサイズをご使用下さい。




注意

- ・ラテックスアレルギーの方は使用しないで下さい。
- ・薄いゴム膜のため、破れないよう爪や突起に注意してお取り扱い下さい。
- ・逆流防止膜は消耗品です。破れたり劣化しますと逆流防止機能が十分に働かなくなりますので、新しいものにお取替えてください。
- ・皮膚に発赤などの異常がみられた場合は、ただちに使用を中止して下さい。

逆流防止膜の装着方法

・完成図

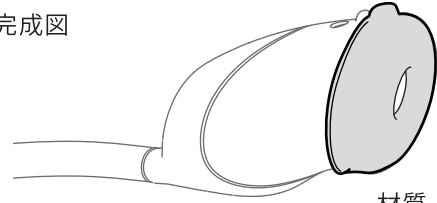


材質：ラテックス

- 1 逆流防止膜を上部のヌケドメにひっかけ、指で押さえながら軽く伸ばしてかぶせます。


※爪で膜を破らないようお気をつけ下さい。

押さえる

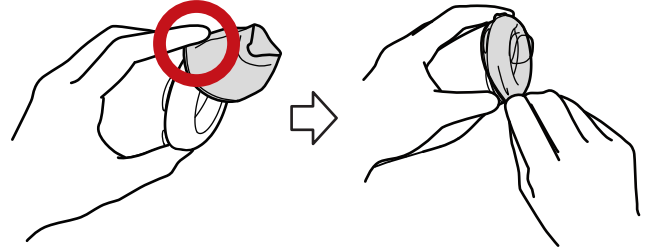

- 2 孔位置が円の中心にくるように微調整して下さい。また、逆流防止膜のフチがレシーバーの5箇所突起を越えていることを確認して下さい。

5箇所突起を越えて装着

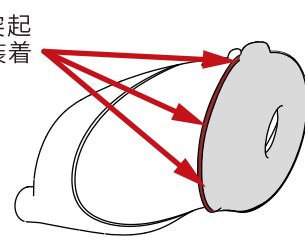

孔位置を中心に

- 3 通常の手順と同様にレシーバーにペニスを挿入します。ペニスが柔らかいときは、ペニスが曲がらないように手指をそえて押し込みます。

●お手入れについて

- ・1日1回水洗いし、ティッシュ等で軽く水気をふき取ってから、市販のベビーパウダーをまぶして下さい。
- ・濡れたまま放置しないで下さい。膜がくっついて破れやすくなります。
- ・破れた場合は新しいものと取り替えて下さい。

適応ゲージ



注意

- ・このゲージはあくまで目安としてお使い下さい。サイズによらず、ペニスがうっ血する、きつい感じがするなどの異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。

●ゲージの使い方

- ・ゲージのくぼみをペニスの根元から約2cmのところ当て測って下さい。
- ・直径22,25,30mmの方はA、30,35mmの方はBサイズをご使用下さい。



直径 22mm

直径 25mm

直径 30mm

直径 35mm

