



専用ガーター

装着の方法


- 1** 専用ガーターを広げ、中心にレシーバを置きます。

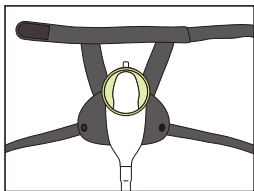


- 2** レシーバ部分を包むように巻き、ボタンを留めて固定します。

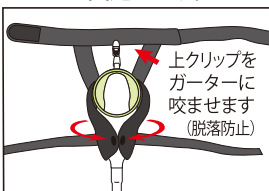


- 3** 腰ベルトをマジックテープで固定します。

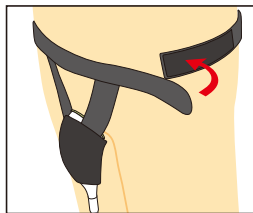

- 4** 適当な位置になるよう上下左右調整して下さい。

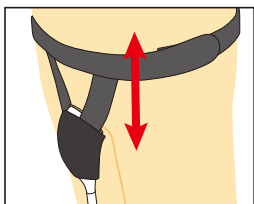


- 5** 二本の紐を股下から後ろ側に通し、マジックテープで固定します。

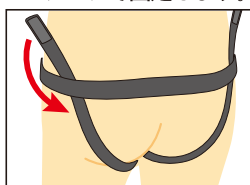


※強く引っ張らないで固定したほうが安定します

- 6** 後方固定紐を左右にずらし、お好きな位置に調整して下さい。

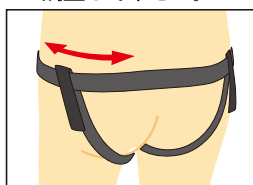

- 7** 太もも固定バンドでチューブを固定して下さい。
※ チューブが肌に擦れて気なる場合

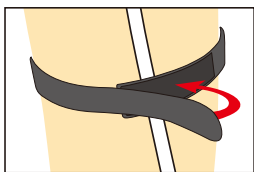

品質表示 / ポリエステル、ポリプロピレン

お洗濯上の注意



手洗い



絞りNG



漂白NG



アイロンNG



袋



台紙

Mr. ユリナー 専用ガーター
MUR102



4 562133 587200

朝日産業株式会社 医療機器事業部 TEL 052-684-6829
Asahi Industry Co., Ltd
medical@asahi-sg.co.jp
〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

専用ガーター

トイレ・お風呂・お風呂・お風呂
いつでもどこでも使える

